

Hygieneempfehlung

DLRG-Bezirk Lüneburger Heide e.V. (LH)

Hier : >>>> Bereich Wettkampf <<<<<

=====

In Anlehnung und auf Grundlage des geltenden Hygienemanagements für Erste Hilfe- und Sanitätsausbildung des DLRG Landesverbandes Niedersachsen e.V. hat der

DLRG Bezirk Lüneburger Heide (LH) e.V.

Empfehlungen für die Hygiene bei den DLRG-Bezirks-Wettkämpfen erarbeitet, die von allen teilnehmenden Gliederungen einzuhalten sind.

(Aktuelle Hinweise zum Bereich Technik / Medizin auf der Internetseite des DLRG-LV-Niedersachsen:

<http://niedersachsen.dlrg.de/fuer-mitglieder/technik.html>)

Der Veranstalter (Bezirk Lüneburger Heide, vertreten durch das Bezirksvorstandsmitglied „Technischer Leiter“) der Bezirksmeisterschaften, bestellt einen „Hygienebeauftragten“ für den HLW – Wettbewerb.

Der Hygienebeauftragte stellt den ordnungsgemäßen Umgang und die Einhaltung des Hygienemanagements beim HLW-Wettbewerb sicher.

HLW-Puppen

Die HLW - Puppen werden von den DLRG-Ortsgruppen (OG) in desinfizierten, gereinigtem Zustand, mit einer Kopie des Hygienenaachweises (liegt der Puppe bei), am Wettkampftag dem Wettkampfleiter HLW (WKL-HLW) übergeben. Das Protokoll der Desinfektion liegt bei der DLRG-Gliederung, die die HLW – Puppe gestellt hat. Ist kein Hygienenaachweis für die Puppe vorhanden, wird diese ggf. nicht eingesetzt.

Die Puppen werden nach dem Wettbewerb „UNREIN“ und ggf. mit Mängelhinweisen der liefernden DLRG-Gliederung/ OG zurück übergeben. Die ordnungsgemäße Desinfektion und Reinigung der HLW – Puppe nach geltendem Hygienemanagement, obliegt der liefernden DLRG-Gliederung/ jeweiligen OG. Weiterhin bleibt die Verantwortung für die vorschriftenkonforme Desinfektion und Reinigung bei der abgebenden Gliederung

Gesichtsmasken

Die eingesetzten HLW-Wettkampfrichter: jeder führt mindestens eine desinfizierte Gesichtsmaske zu den Wettkämpfen bzw. Wettkampfrichter-Seminaren mit.

HLW-Teilnehmer: jeder Wettkampfteilnehmer muss sich seine eigene saubere Maske aus der entsendenden Gliederung zum Wettkampf mitbringen. Es wird empfohlen, eine Reservemaske mitzuführen.

vor Ort: Gesichtsmasken für die HLW-Puppen werden vom Veranstalter nicht gestellt. Reservemasken für die HLW-Teilnehmer sind nicht vorhanden.

Eine Desinfektion der Gesichtsmasken durch den Veranstalter wird nicht durchgeführt und nicht angeboten.

Hygiene vor dem Wettkampf: Bevor der HLW-Teilnehmer an den Start geht, möge er bitte auf die persönliche Händehygiene achten. Die Händehygiene oder eine Handdesinfektion wird vor Ort ermöglicht.

Die Anwendung dieser „Hygiene-Empfehlungen“ in den nachgeordneten DLRG-Gliederungen des Bezirkes Lüneburger Heide soll zeitnah im Jahre 2013 umgesetzt werden!

Allgemein gilt für die HLW-Puppen und die Masken das „Hygienemanagement in der HLW – Ausbildung und die Desinfektionsanweisung“ des DLRG Landesverbandes Niedersachsen e.V. in Verbindung mit den Hygienevorgaben des jeweiligen Herstellers (z.B. Laerdal).

<http://www.laerdal.com/de/doc/60/Little-Anne#webShop-ACCESSORIES>

Für die Einhaltung dieser Rahmenvorgaben sind die jeweiligen Gliederungen verantwortlich.

Im Auftrag



Hans-Werner Meyer zur Heide
Technischer Leiter im DLRG-Bezirk Lüneburger Heide

Am Hang 6 Telefon: 05161 / 6165
29664 Walsrode
Email: mzhwalsrode@web.de



Desinfektionsplan

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Konzentration	Mindesteinwirkzeit	Wer?
Hände	vor / nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen	Einreiben	Alkoholisches Händedesinfektionsmittel (z. B. Sterillium®)	unverdünnt	Nach Herstellerangabe für hygienische Händedesinfektion	Jeder
Hände	vor / nach Kontakt mit bereits desinfizierten Gegenständen	Einreiben			Nach Herstellerangabe für hygienische Händedesinfektion	Ausbilder Desinfizierender
Laerdal Resusci (Skillmeter) Anne / Laerdal Resusci Junior / Laerdal Little Anne / Laerdal Little Junior						
Gesichtsteile	nach Gebrauch (Teilnehmer)	Einlegen	Perform®	0,5 % 1x 40g-Beutel in 8 l Wasser auflösen	1 Stunde	Ausbilder
Oberfläche (Oberkörper, Hals und Haarteil)	nach jeder Übungseinheit / Kurs	Abwaschen			Nach Abwischen trocknen lassen	Ausbilder
Einmalluftweg	nach jeder Übungseinheit / Kurs	Entfernen und entsorgen				Ausbilder
Laerdal Little Baby						
Gesichtsteile	nach Gebrauch (Teilnehmer)	Einlegen	Perform®	0,5 % 1x 40g-Beutel in 8 l Wasser auflösen	1 Stunde	Ausbilder
Oberfläche (Kopf)	nach jeder Übungseinheit / Kurs	Abwaschen			Nach Abwischen trocknen lassen	Ausbilder
Einmalluftweg	nach Gebrauch (Teilnehmer)	Entfernen und entsorgen				Teilnehmer
Ambu Man (Torso) / Ambu MultiMan / Ambu UniMan						
Gesichtsteile	nach Gebrauch (Teilnehmer)	Einlegen	Perform®	0,5 % 1x 40g-Beutel in 8 l Wasser auflösen	1 Stunde	Ausbilder
Oberfläche (Oberkörper, Hals und Haarteil)	nach jeder Übungseinheit / Kurs	Abwaschen			Nach Abwischen trocknen lassen	Ausbilder
Einmalluftbeutel	nach Gebrauch (Teilnehmer)	Entfernen und entsorgen				Teilnehmer

Stand: März 2010